


# PROTETOR FACIAL

PLASCONY



Visão frontal

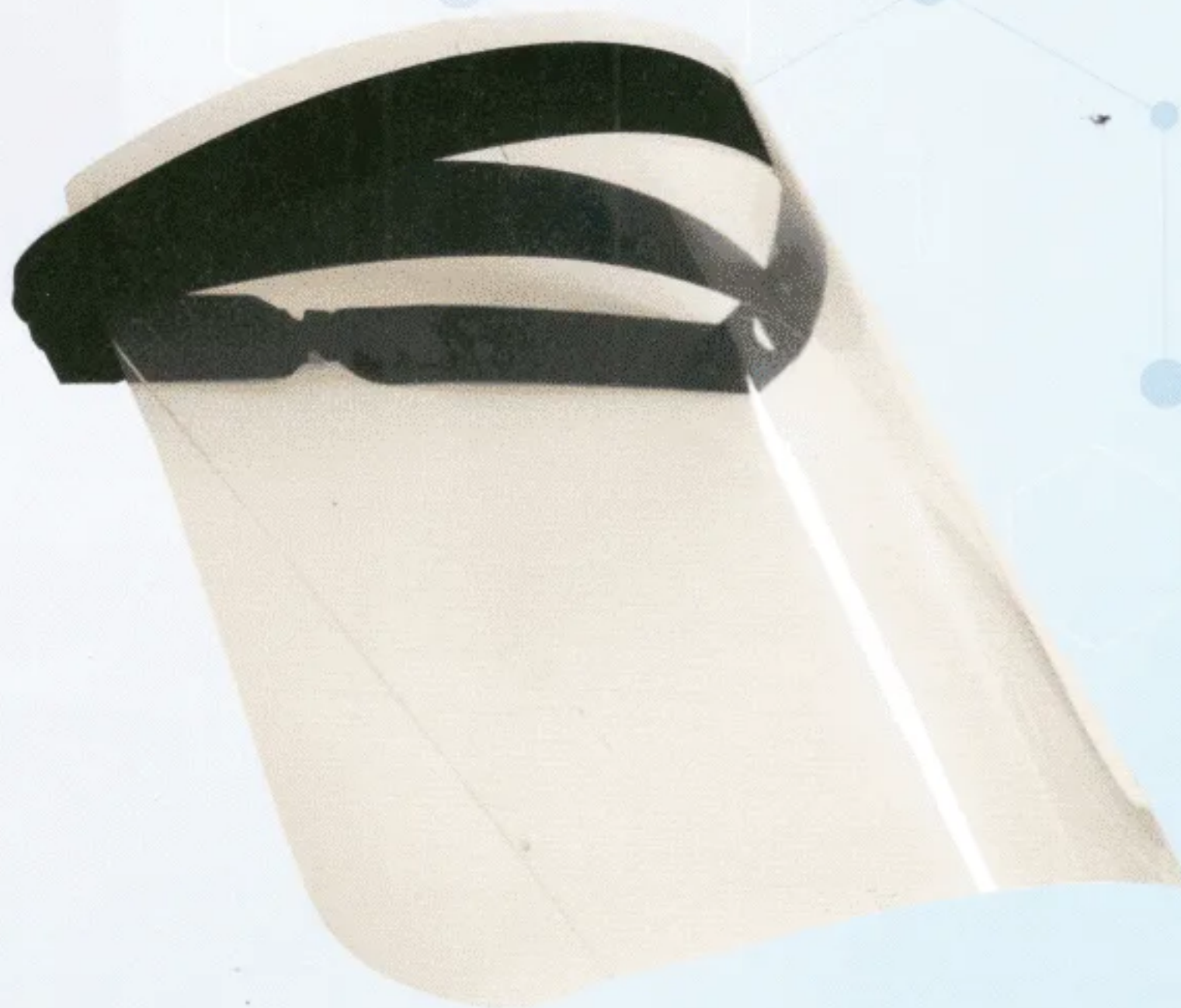

Visão lateral

## Para uso de profissionais que tenham contato com público:

- Agências bancárias
- Clínica veterinária
- Clínica de saúde
- Salão de beleza
- Supermercado
- Clínica de estética
- Clínica odontológica
- Outros

### Características:

- ✓ Reutilizável e ajustável.
- ✓ Evita o contato com gotículas, saliva e fluídos.
- ✓ Pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária.
- ✓ Suporta esterilização por raios gama, gás e autoclaves de laboratório.
- ✓ PP de alta tecnologia que proporciona extrema transparência.
- ✓ Leve e confortável.

### Guia de montagem



1 - Pegue a tira preta menor e encaixe no visor de cima para baixo



2 - Passe a tira no visor, trançando-a



3 - Dobre a trava da tira maior



4 - E a encaixe na tira menor que já está acoplada no visor



5 - Repita o processo na outra extremidade



6 - Ajuste e trave a regulagem



7 - De maneira que fique confortável



8 - Dobre no vinco do visor para maior proteção

Dimensão do visor:  
300mm x 240mm